

AEDtrax Gebrauchsanweisung

Nehmen Sie das AED 3-Elektrodenpaket aus dem Elektrodenfach.

notieren Sie die Seriennummer des AED (auf der Rückseite; beginnt mit „AX.....“) und die Trax-Nummer (auf der Oberseite; beginnt mit „TH.....“)

1



Entfernen Sie mit einem Torx-Schraubendreher T8 die Schraube der Gummidichtung auf der Rückseite des AED. Entsorgen Sie die Gummidichtung zusammen mit der schwarzen Unterlagsscheibe (heben Sie die Schraube auf).

2



Schliessen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an der Rückseite des AED an und bringen Sie die zuvor entfernte Schraube wieder an.


3



AEDtrax Gebrauchsanweisung

Den rechten Rand des AED-Gehäuses (von hinten gesehen) mit einem entfettenden Mittel (z. B. Reinigungsbenzin) reinigen.

4

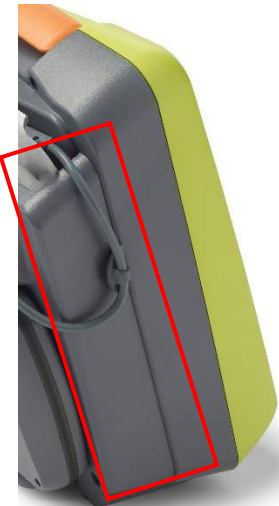

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kabelhalterung und bringen Sie sie am Rand des AED-Gehäuses an.

5



Öffnen Sie die Gummidichtung am trax und schalten Sie ihn mit einem dünnen Metallstift (z.B. einer Büroklammer) ein

mittlere Position: trax EIN, GPS AUS

linke Position (empfohlen): trax & GPS EIN

rechte Position: Trax aus


6



AEDtrax Gebrauchsanweisung

Ziehen Sie die Schiebeplatte am trax nach oben, setzen Sie den trax gegen das Elektrodenfach und drücken Sie dann die Schiebeplatte nach unten, bis sie einrastet und sich mit dem AED verbindet.

7

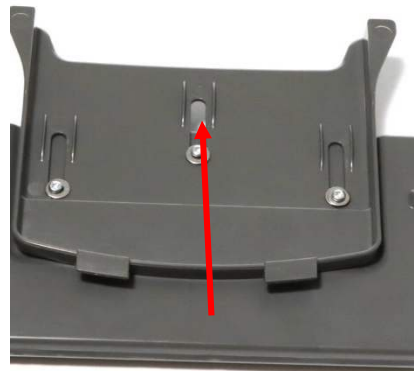

Stecken Sie den USB-C-Stecker in trax und prüfen Sie, ob das Kabel sauber verlegt ist.

8



Legen Sie die Elektroden zurück in das Elektrodenfach (Schere zum AED, Notfallset vom AED weg).

9



AEDtrax Gebrauchsanweisung

Konfigurieren Sie den AED:

Schalten Sie das ZOLL AED 3-Gerät in den Nicht-Rettungsmodus ein. Halten Sie die Taste „ON/OFF“ 10 Sekunden lang gedrückt oder bis Sie das ZOLL-Logo sehen.

10



Drücken Sie das Symbol „Gerätekonfiguration“, um den Konfigurationsbildschirm zu öffnen.

Drücken Sie das Symbol „Supervisor Access“.

11



Geben Sie den 6-stelligen Code aus dem Benutzerhandbuch ein und bestätigen Sie mit „OK“.

Standard Passwort: 5, 6, 7, 8, 9, 0

12



AEDtrax Gebrauchsanweisung


Drücken Sie das Symbol «Einstellungen».

13




Drücken Sie „Erweitert“.
Setzen Sie „USB Self-Test Push Active“ auf „ON“ und bestätigen Sie mit „OK“ und „Save“.

14

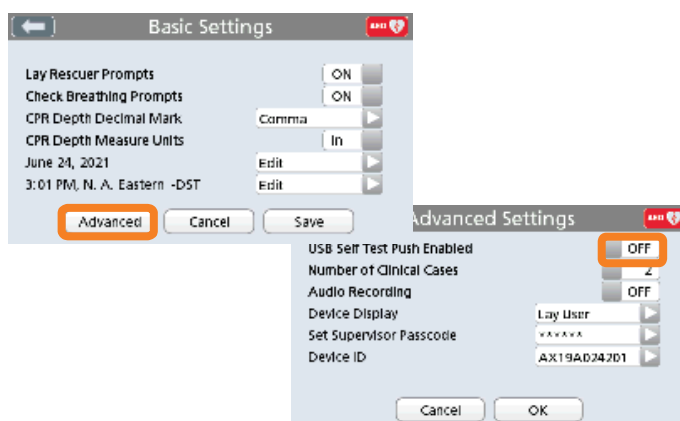

Drücken Sie auf das Symbol „Dateien exportieren“.
Wählen Sie „Geräteverlaufsdaten“ und drücken Sie „Speichern (USB)“.
Wenn am Ende „Abgeschlossen“ erscheint, war die Übertragung erfolgreich. Bestätigen Sie mit „OK“.

15

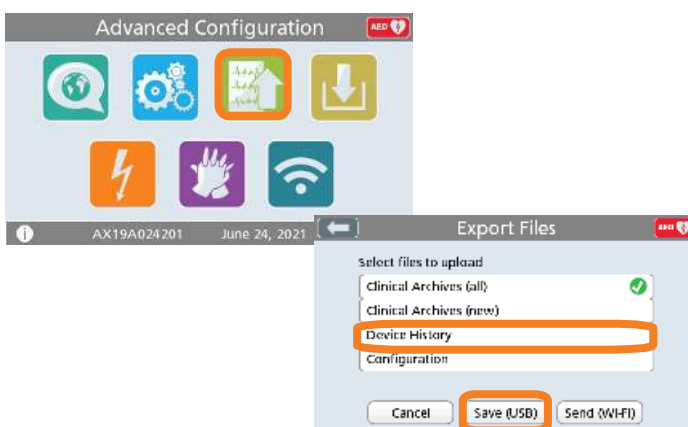

AEDtrax Gebrauchsanweisung


Schalten Sie den AED 3 aus, indem Sie die Einschalttaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Abschaltung läuft“.

16



Melden Sie sich bei plustrac an, um Ihr Gerät auf der Plattform einzurichten.

17

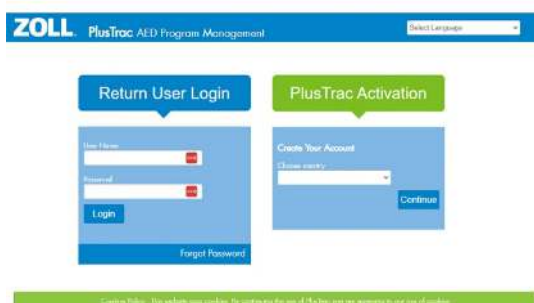

Wenn Sie AEDtrax mit der RFID-Option verwenden, legen Sie die RFID-Karte auf eine feste Oberfläche. Wenn die Oberfläche metallisch ist, verwenden Sie einen Abstandhalter von mindestens 5 mm zur RFID-Karte. Legen Sie die RFID-Karte so in den Schrank, dass sie mit der linken oberen Ecke des Trax verbunden werden kann, wenn dieser in den Schrank gelegt wird.

18

