

AEDtrax Manuel d'instruction

Retirer le porte-électrodes de l'AED 3 du compartiment des électrodes.

Notez le numéro de série du AED (au dos ; commence par « AX..... ») et le numéro Trax (sur le dessus ; commence par « TH..... »).

1



À l'aide d'un tournevis Torx T8, retirez la vis du joint en caoutchouc situé à l'arrière du AED et jetez le joint en caoutchouc ainsi que la rondelle noire (conservez la vis).

2



Branchez le câble USB fourni à l'arrière du AED et refixez la vis précédemment retirée.

3



AEDtrax Manuel d'instruction

Nettoyez le bord droit du boîtier de l'AED (vu de l'arrière) avec un agent dégraissant (par exemple, de la benzine de nettoyage).

4



Retirez le film protecteur du support de câble et fixez-le au bord du boîtier de l'AED.

5



Ouvrez le joint en caoutchouc du trax et mettez-le en marche à l'aide d'une fine tige métallique (par exemple, un trombone).

position médiane : trax ON, GPS OFF

position gauche (recommandée) : trax et GPS allumés

position droite : trax éteint


6



AEDtrax Manuel d'instruction

Tirez la plaque coulissante de trax vers le haut, placez trax contre le compartiment à électrodes, puis poussez la plaque coulissante vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et se connecte au AED.

7

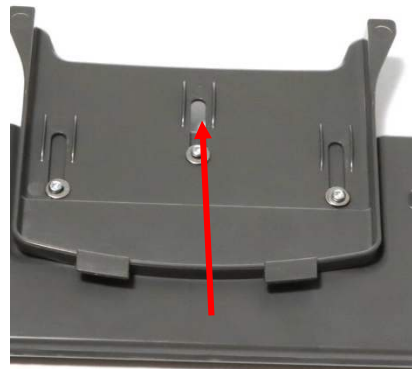

Insérez la prise USB-C dans le trax et vérifiez que la disposition du câble est propre.

8



Replacer les électrodes dans le compartiment à électrodes (ciseaux orientés vers le AED, kit d'urgence orienté à l'opposé du AED).

9



AEDtrax Manuel d'instruction

Configurez le AED :

Mettez l'appareil ZOLL AED 3 en mode non-secours. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes ou jusqu'à ce que le logo ZOLL apparaisse.

10



Appuyez sur l'icône « Device Configuration » pour ouvrir l'écran de configuration.

Appuyez sur l'icône « Accès superviseur ».


11



Saisissez le code à 6 chiffres figurant dans le manuel d'utilisation et confirmez en cliquant sur « OK ».

Mot de passe standard : 5, 6, 7, 8, 9, 0

12

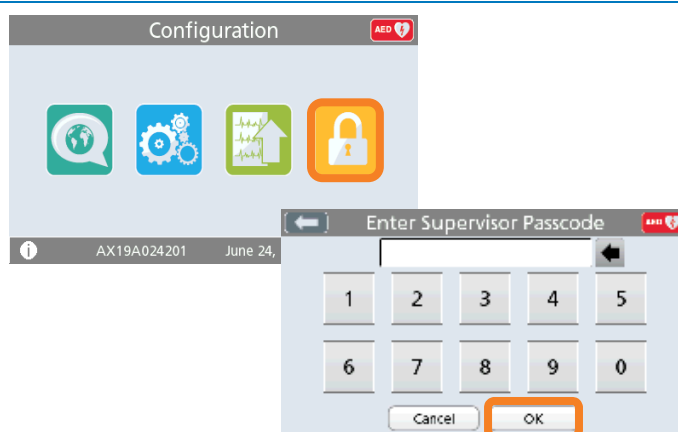

AEDtrax Manuel d'instruction


Appuyez sur l'icône « Settings ».

13




Appuyez sur « Avancé ».
Réglez « USB Self-Test Push Active » sur « ON » et confirmez avec « OK » et « Save ».

14

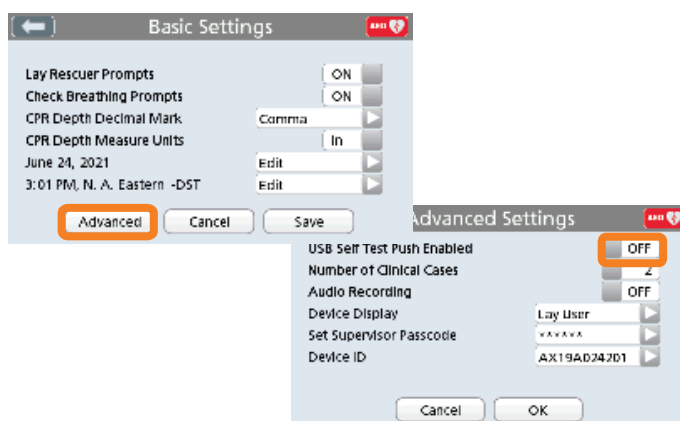

Appuyez sur l'icône « Exporter des fichiers ».
Sélectionnez « Données de l'historique de l'appareil » et appuyez sur « Enregistrer (USB) ».
Si le message « Completed » apparaît à la fin, le transfert a réussi. Confirmez en appuyant sur « OK ».

15

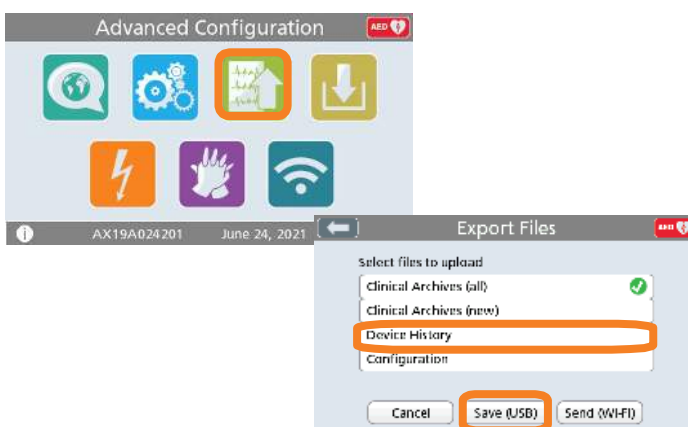

AEDtrax Manuel d'instruction


Éteignez l'AED 3 en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes. Le message « Arrêt en cours » s'affiche sur le moniteur.

16



Connectez-vous à plustrac pour configurer votre appareil sur la plateforme.

17

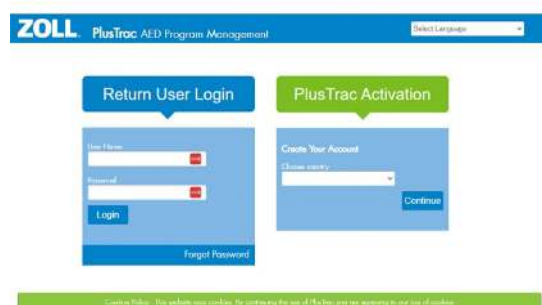

Si vous utilisez AEDtrax avec l'option RFID, placez la carte RFID sur une surface solide. Si la surface est métallique, utilisez un support de distance d'au moins 5 mm pour la carte RFID. Placez la carte RFID dans l'armoire de manière à ce qu'elle puisse se connecter au coin supérieur gauche de trax lorsqu'elle est placée dans l'armoire.

18

