

AEDtrax Manuale di istruzioni

Rimuovere il pacchetto di elettrodi AED 3 dal vano elettrodi.

annotare il numero di serie del DAE (sul retro, inizia con "AX.....") e il numero Trax (sulla parte superiore, inizia con "TH.....").

1



Con un cacciavite Torx T8, rimuovere la vite della guarnizione di gomma sul retro del AED e smaltire la guarnizione di gomma insieme alla rondella nera (conservare la vite).

2



Collegare il cavo USB in dotazione alla parte posteriore del DAE e riattaccare la vite precedentemente rimossa.


3



AEDtrax Manuale di istruzioni

Pulire il bordo destro dell'alloggiamento del AED (visto dal retro) con un agente sgrassante (ad esempio, benzina per la pulizia).

4

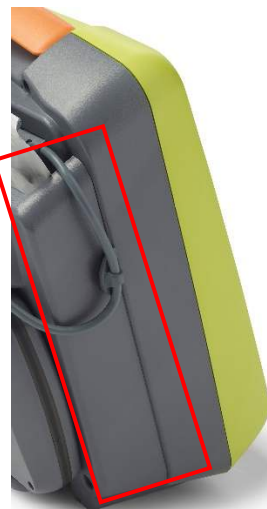

Rimuovere la pellicola protettiva dal supporto del cavo e fissarlo al bordo dell'alloggiamento del AED.

5



Aprire la guarnizione di gomma del trax e accenderlo con un sottile spillo metallico (ad esempio, una graffetta).

posizione centrale: trax ON, GPS OFF

posizione sinistra (consigliata): trax e GPS ON

posizione destra: trax spento

6



AEDtrax Manuale di istruzioni

Tirare la piastra scorrevole del trax verso l'alto, posizionare il trax contro il vano elettrodi, quindi spingere la piastra scorrevole verso il basso finché non scatta in posizione e si collega all'AED.

7



Inserire la spina USB-C in trax e verificare che la disposizione del cavo sia pulita.

8



Riposizionare gli elettrodi nel vano elettrodi (le forbici rivolte verso il DAE, il kit di emergenza rivolto verso il DAE).

9



AEDtrax Manuale di istruzioni

Configurare il AED:

Accendere il dispositivo ZOLL AED 3 in modalità non di soccorso. Tenere premuto il pulsante "ON/OFF" per 10 secondi o finché non viene visualizzato il logo ZOLL.

10



Premere l'icona "Configurazione dispositivo" per aprire la schermata di configurazione.

Premere l'icona "Accesso supervisore".


11



Inserire il codice a 6 cifre del manuale d'uso e confermare con "OK".

Password di default: 5, 6, 7, 8, 9, 0

12

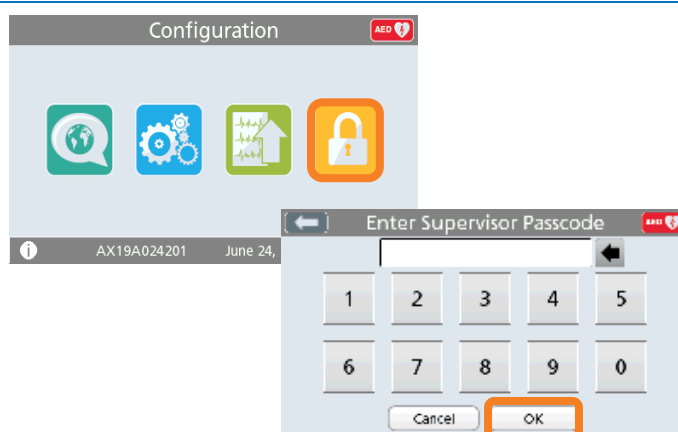

AEDtrax Manuale di istruzioni


Premere l'icona "Impostazioni".

13




Premere "Avanzate".
Impostare "USB Self-Test Push Active" su
"ON" e confermare con "OK" e "Save".

14

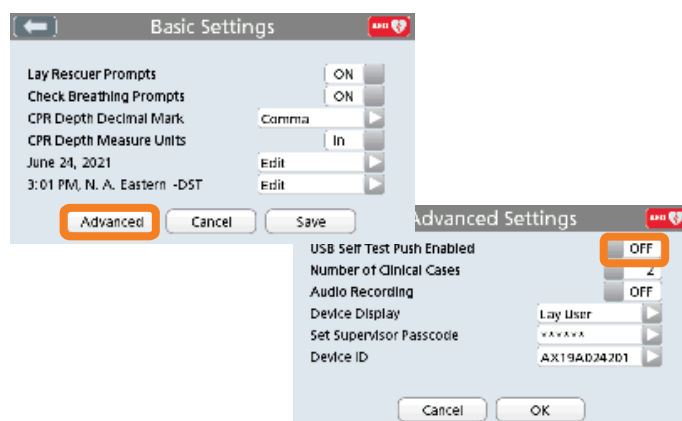

Premere l'icona "Esporta file".
Selezionare "Dati cronologia dispositivo" e
premere "Salva (USB)".
Se alla fine appare "Completato", il
trasferimento è riuscito. Confermare con
"OK".

15

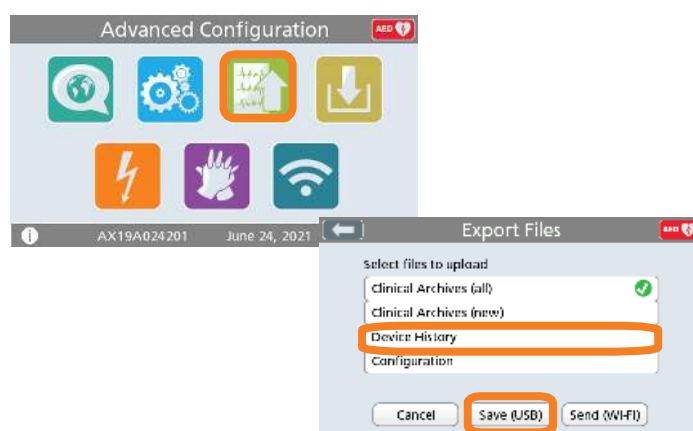

AEDtrax Manuale di istruzioni


Spegnere il AED 3 premendo il pulsante di accensione per circa 2 secondi. Sul monitor apparirà il messaggio "Spegnimento in corso".

16



Accedere a plustrac per impostare il dispositivo sulla piattaforma.

17

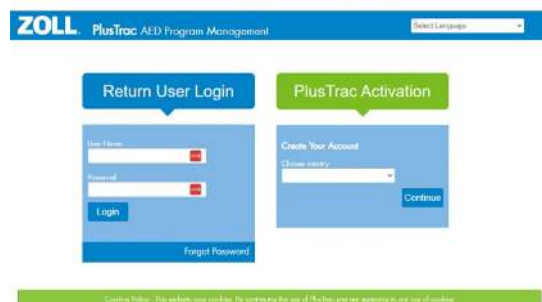

Se si utilizza AEDtrax con l'opzione RFID, posizionare la scheda RFID su una superficie solida. Se la superficie è metallica, utilizzare un supporto distanziatore di almeno 5 mm dalla scheda RFID. Posizionare la scheda RFID nell'armadietto in modo che possa collegarsi con l'angolo superiore sinistro di Trax quando viene inserito nell'armadietto.

18

